

[www.sw-perfect.com](http://www.sw-perfect.com)



扫一扫公众号  
获取葆丰更多产品资讯



扫一扫视频号  
获取根管治疗相关知识

深圳市葆丰医疗器械有限公司  
Shenzhen Perfect Medical Instruments Co., Ltd

邮箱: [likee@dental-perfect.com](mailto:likee@dental-perfect.com)

地址: 深圳市龙岗区横岗街道四联社区伟群路2号3栋103

电话: 0755-28540953 传真: 0755-28540953

powered by:



2020/01/13

# RETREATY

Endodontics kit

再治疗锉

一种专门用于根管再治疗的系统  
以微创的治疗理念而设计  
遵循Styleitaliano牙髓病学原理


 perfect® 葆丰



# RETREATY

Endodontics kit

再治疗锉

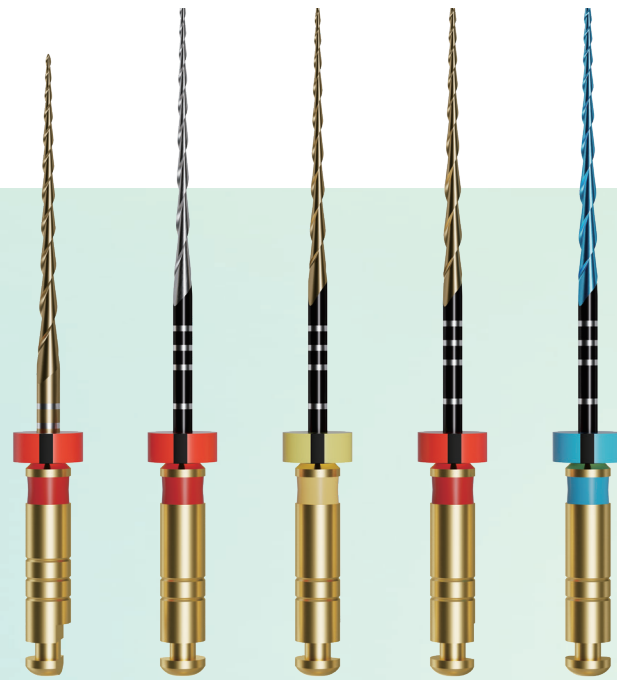

5支装

型号	Size	型号	Size
Bull	25/.07	ShapY1	20/.04
SkinnY	25/.04	ShapY2	25/.04
		ShapY3	30/.04

2支装

型号	Size
Bull	25/.07
SkinnY	25/.04

横截面  
Cross section:



转速

Speed range: 350~500RPM

扭矩

Torque: 1.5N-CM

两种模式可选择

**A** 连续旋转模式  
顺时针旋转

**B** 往复旋转模式  
顺时针旋转150°、逆时针30°

## BULL

25/.07

专门用于根管再治疗过程中去除牙胶充填材料。金色合金热处理、尖端切割角设计，较短的工作螺纹，短时间内无需任何溶剂可快速清除根管上部1/3的充填材料。



如今，与首次根管治疗对比，根管再治疗越来越多，而且再治疗其病因更为复杂，将原根管充填物在进行去除的过程中不但耗费时间而且困难，这就是为什么我们决定根据 Styleitaliano 牙髓病学的原理，设计一种特定的治疗系统，以微创的方式进行再治疗。



## SKINN Y

25/.04

银色合金，弹性强切割锋利，有效去除根管的牙胶充填物，保留根管的形态，并在接近根尖末端创建一条可重复顺滑通道。



## SHAP Y 1

20/.04

这是第一支成型锉，金色合金，柔韧但具有良好的切割能力，遵循根管原始结构。

## SHAP Y 2

25/.04


再治疗中最流行的精修型号，金色合金，具有良好的柔韧性和抗折断性能。



## SHAP Y 3

30/.04

蓝色合金，顶端形状扩大时，具有更高的灵活性。在不改变原始解剖结构的情况下实现最大程度的预备。

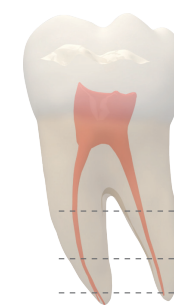

Bull

SkinnY

#10K锉

SkinnY

ShapY 1

ShapY 2

ShapY 3

### step-1

通过放射影像学检查确定根管解剖结构(如长度信息、弯曲情况等)以及前次治疗情况;

### step-2

去除冠部修复体，建立至根管口的直线通路;

### step-3

使用Bull.07#25锉，去除根管中上部分充填材料，半切割尖端可在有冲洗液及适当转速情况下高效切入去除充填材料，无需过度加压(对于根管弯曲部尤其小心);

### step-4

继续以每次1-3mm的速度深入去除充填材料，如牙根较长可配合SkinnY.04#25，直至接近工作长度2-3mm处;

### step-5

如根尖区充填材料未被完整带出，使用#10K锉在牙胶与根管壁间定位间隙，建立旁路，使用根测仪获得工作长度，再使用SkinnY.04#25去净根尖区充填材料;

### step-6

最后使用ShapY1预备至工作长度，再依据临床需求可备至ShapY2或ShapY3。

备注:应全程伴随充分冲洗消毒,并保持操作动作轻柔